

ГКП на П	XB «Областная станция	а скорой медицинской	помощи»		
Наименование структурного подразделения:	Все структурные подразделения организации				
Название	Стандарт операционн		Se of the long of		
документа:	Правила безопасной	эксплуатации кислор	одных баллонов		
Утвержден:	Приказом Главного в 2023 г.	врача№ <u> 4-о</u> о	т « <u>ос</u> » январь		
Разработчик:	Должность	ФИО	подпись		
	Главный фельдшер	Сарина Б.Б.	acy		
Согласовано:	Заместитель главного врача по медицинской части	Неталиева Д.П.	H		
	Заместитель главного врача по ОМР	Кушетова Г.А.	af		
	Врачи эксперты	Балмагамбетова Г.Ж. Абдуллаева А.З.	Juech-		
Версия № 1		Дата следующего пе	ересмотра » 2026 год		

#### Актобе 2023год

СОП: Правила безопасной эксплуатации кислородных	Версия 1	Стр. 0 из 5	От 05.01.2023г
баллонов			



### Стандарт операционных процедур: Правила безопасной эксплуатации кислородных баллонов

- 1. Цель: Обеспечение мер безопасности при эксплуатации и транспортировке кислородных баллонов.
- 2. Область применения: выездные бригады.
- **3. Ответственность:** средний и врачебный медицинский персонал выездных бригад.

#### 4. Определение:

Медицинский кислород отличается от любого другого своей более высокой концентрацией и отсутствием различных примесей. Основные источники кислорода — это в первую очередь кислородные концентраторы, специальные устройства для химического получения кислорода, системы кислород обогащения и баллоны с жидким или газообразным кислородом. Наиболее популярны сейчас кислородные концентраторы, в связи с их безопасностью, надежностью, мобильностью, экономической выгодностью и, конечно, высокой концентрацией «производимого» кислорода — до 95%.

Применение медицинского кислорода необходимо в неотложных ситуациях, при проведении обширных хирургических операций, при наркозах, где требуется искусственная вентиляция легких, при проведении реанимационных мероприятий. Такие серьезные заболевания как инсульт, инфаркт миокарда, хроническая дыхательная недостаточность так же требуют лечения кислородом.

- 5. Ресурсы/оснащение:
- 1) кожный антисептик для обработки рук.
- 6. Документирование: журнал приема -передачи медицинского оборудования.
- 7. Основная часть процедуры:
- 1) Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК; не смазывать их питательными кремами, содержащими жировую основу;
- 2) Убрать волосы под головной убор;
- 1) Внимательно осмотреть баллон и убедиться в том, что на нем отсутствуют следы масел и жировых загрязнений, резьбовые соединения не допускается смазывать;
- 2) Проверить дату освидетельствования баллона;

	SOUTH AND SOUTH		
СОП: Правила безопасной эксплуатации кислородных	Версия 1	Стр. 1 из 5	От 05.01.2023г
баллонов			



- 3) Проверить редуктор, по возможности устанавливать руками, накидные гайки допускается затягивать лишь слегка, этого для обеспечения безопасности достаточно;
- 4) После окончания работы от баллона должен быть отсоединен редуктор, вентиль баллона плотно закрыт и навинчен предохранительный колпак, после чего баллон убирается в специально отведенное для его хранения место;
- 3) Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК.

and the bridge services and the services and the services are services are services and the services are s

#### 8. Примечания:

- 1) Лицо, осуществляющее эксплуатацию кислородного оборудования и кислородного баллона, должно быть одето в чистую (не замасленную) одежду желательно не синтетику т.к. она при трении может искрить;
- 2) Проявить максимум внимания выполняемой работе, не отвлекаясь на выполнение другой работы и посторонними разговорами;
- 3) Не допускать резкого открывания и закрывания вентиля, что может привести к самовоспламенению кислорода и выгоранию частей вентиля и редуктора;
- 4) Не производить ремонт вентиля, подтягивания резьбовых соединений при наличии кислорода в баллоне;
- 5) Кислородные баллоны, у которых при осмотре поверхности выявлены трещины, вмятины, раковины и риски глубиной более 10% от номинальной толщины стенки, износ резьбы горловины, а также на которых отсутствуют некоторые паспортные данные, выбраковываются;
- 6) При возникновении ситуаций, которые могут привести к несчастному случаю или аварии, следует немедленно прекратить все работы и сообщить об этом непосредственному руководителю;
- 7) При возникновении возгорания немедленно приступить к его ликвидации первичными средствами пожаротушения, и при необходимости вызвать пожарную службу.

#### 9. Ссылки:

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020. «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации»;
- 2) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

СОП: Правила безопасной эксплуатации кислородных	Версия 1	Стр. 2 из 5	От 05.01.2023г
баллонов			



- 3) Приказ Председателя Комитета государственного санитарноэпидемиологического надзора МЗ РК от 23.04.2013г. № 111 «Методические рекомендации по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК»;
- 4) Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года № ҚР ДСМ 111«Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций»;
- 5) Инструкция по технике безопасности при работе с кислородными баллонами;
- 6) Инструкция по эксплуатации кислородных баллонов от производителя.

СОП: Правила безопасной эксплуатации кислородных	Версия 1	Стр. 3 из 5	От 05.01.2023г
баллонов		200	



### Лист регистрации изменений

№	№ раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменения
		5 66	
	8		
V 10319 19	The second secon		
Here care			

СОП: Правила безопасной эксплуатации кислородных	Версия 1	Стр. 4 из 5	От 05.01.2023г
баллонов		1	



### Лист ознакомления

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Papadarun Tepurino	operagues.	06.01.2023	Roge
2	Epruar Pacuajain Mopaserejun	genojuen	06-01 0003	Alex
3	Meeroud Euron	germene p	06.01.2023	Det.
4	Omereno 6 M. 1	pabyme	66.01.83	Ou
	Ecrepaebo. S.M.		1	The .
6	Typapol M.S.	Joels guego.	06.61. \$3	Ac.
7	Kagrosod-S.A	P.P	06.01.23	S
	Rennissed y. A	9-p	06.01.23	16
9	Unione 21 T	9-p	06 01 2023	py
10	Miurtecob	97	06 Of 10H3	P
11	DevepSeub	q>-p	06.01 8023	
12	Lemerer EH.	gr-p	06.01.200	Leen
13	Bucerousere # M	9-p.	06.012023	d
14	Capaciedes C.A	7-9	06.01.23	05
15	Princepol M. E	90-p	06.04.25	fol

СОП: Правила безопасной эксплуатации кислородных	Версия 1	Стр. 5 из 5	От 05.01.2023г
баллонов		¥7	



		T	1	
16	Mymuel A. p	19-1	06.01.2013	und
17	Oneman and Al	go - P	06-01.23	py
18	Seintaine 5.0	ф-p		deent &
19	legeorapel 5-4	ef-p	09.01.23	
20	Raversone U. G	4-p	09.0123	too
21	Laclance	7-1	09. 01.23 00 218	8
	Mayasan	97	09.0323	A
23	bannaduel A	90-p	09.0123	
24	Kapajoru 90. 5	9-1	09.01.23	0 //
	Sporksai 4. 5	op-p	09.01.23	/
	Your and all of	f-f		19
27	Apringer 2	Y-P	09,0123	fort.
28	Myxansegunost	9-1	09.01.23	An
29	Oreviney A	9-1	09.01.23	M
30	Kanadan &	90-p	09.01.23	Stand
31	and Kud. A.	Y-P	09.81.23	

СОП: Правила безопасной эксплуатации кислородных баллонов	Версия 1	Стр. 6 из 5	От 05.01.2023г
---	----------	-------------	----------------



32	Lazormscar M	9p-p	04.01.13	Det
33	Epseud Ale	9/	09.01.25	H
34	Accounting year &.	fo - 8	J.O. 23	the
35	Flincome 9.	4-1	09-01.27	D. Ha
36	Dricole bus	70-10	09.0127	10
37	Криворучко ИВ	go - p	09.01.23	Wfinns 2
38	Happen Mich	9-p	09.01.13	A-
39	Hongowan C.C.	p-/2	10.01.23	Morf
40	Unin Egracus A. A	Ø-p	10.0123	Wolf
41	Town & C	gr f	100729	Al
	Kycuepdalo HH	P-P	100123	SKO
43	Julius D.E	Q-P	(00123	De
44	Aucariob Cb	90-p	10.01.23	lif-
45	Tonerey M. B.	92-10	1001. R	3
46	Copy EC.	4p	10.017	- all
47				

СОП: Правила безопасной эксплуатации кислородных баллонов	Версия 1	Стр. 7 из 5	От 05.01.2023г
10 kg			



48	Macasansepren i	ф-р	10.01.23	Mund
49	Jecfacobe	925	10.01.23	Secret
50	hairenenda	Sp	10.01.23	nef
	Le ugod	90 - p	w. ot. 23	Aff
52		Lap	6.0123	3
53	Ganordan	90-p	10.01.23	Kay
54	Marily	gh- p	10.0121	
	Musar &	9-1	10.01.23	
1	Hacegieen	dep	11-0123	
57	Farraver	7-10	11.0123	1
58	torensoes 1	Sp. A	11. 7.28	
59	Marepolo	ch-P	11.01.22	len
60	Pypoai A	4-P	11:01:23	4
61	Hyereaus e	9.9	11.01.28	(H)
62	Frjeparven	0p-p	11.08-23	Ago
63	Cobonosol	PP	11, 2, 27	le

СОП: Правила безопасной эксплуатации кислородных баллонов	Версия 1	Стр. 9 из 5	От 05.01.2023г
			1



64	Yuap &. E	90/p	11.04.2023	A
	Fazapõael. 1	9/p	11.01.205	
	Rosaundalb. III.	p-P	11.01.23	
67	Mercandu. E	op- 6		
68	Vegerander. E Denauxan J. 4	of-p	11.01.2013	Ry
	Gogsepsair T. To	90-J	14.01.2013	
70	Ugucotea 5	gr p	11.01.23	5. mg
71	Eprensi	g-h	1301.23	Epress
72	Uchanguale A.	9- h	13.01.23	Meif
73	Elect & second	9-p	15.01.28	-
74	azdarapendukjel	00-6	13.01.87	
75	Ycei A	ap-p	16-03.23	Gles
76	Theregreed 56	ф-þ	13.0129	de la
77	Mayreer S.	90-3	13. Od. 23	suf
78	Opogrammel A	P-P	13.01.23	#
79	Annai 5	90-P	13.01.29	Boff
	-			//

	СОП: Правила безопасной эксплуатации кислородных баллонов	Версия 1	Стр. 10 из 5	От 05.01.2023г
--	---	----------	--------------	----------------



		T		
80	Crayoba	90-1	13.012	
81	Lyrosen l. ho	g-6.	1301.22	
82	Guean	\$ p	19.01.25	
83	Uspreseyua D.	go - p	44.04.23	JH )
84	Executance HI4	P-12	15,01.23	1
85	grayscel A	9-p	16.01.23	and
86	Miserjon	p-p.	16.01.23	Ad
87	Preencer Sem #	P. P.	16.64.23	B
88	Pairllonan B	PP	16.0123	(My
89	Earnay gu	g-p	16.01.23	less
90	Georgeneer J.	X-P	le . 01. 23	L
91	0 10	/		
92				
93				
94				
95				

СОП: Правила безопасной эксплуатации кислородных баллонов	Версия 1	Стр. 11 из 5	От 05.01.2023г



	-
	-
,	-

	СОП: Правила безопасной эксплуатации кислородных баллонов	Версия 1	Стр. 12 из 5	От 05.01.2023г	
ı					